


ait

交番磁界治療器 エイト

取扱説明書

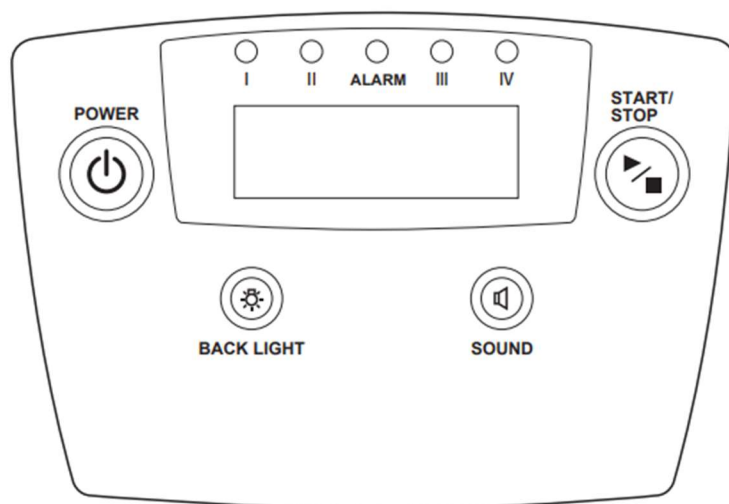

ご使用前に本取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
また、いつでもご覧になれる場所に大切に保管してください。

目次

1 はじめに	2
2 使用上の注意	3
機器の使用に関する注意事項	4
電池に関する注意事項	7
お手入れに関する注意事項	8
保管に関する注意事項	8
廃棄に関する注意事項	9
エイト専用粘着シートの使用に関する注意事項	10
3 ご使用前の準備	
内容の確認	11
本機器の機能	11
各部の名称とはたらき	12
液晶画面の表示	14
電池の入れ方	16
4 使用者による保守・点検	
本体の動作確認	17
電池交換	18
お手入れ	18
5 定期点検	19
6 ご使用方法	
本機器の使い方	20
途中で使用を中止したいとき	23
パッドへのエイト専用粘着シートの使い方	24
7 おかしいな?と思ったら	26
8 仕様	27
9 よくあるご質問	28
10 別売品	29
11 免責事項	29
12 添付文書について	29

使用目的

本機器は、神経を刺激することで体の痛みを和らげることがを目的としています。

使用対象者

取扱説明書の内容を理解できる患者本人および介助者

エイトのしくみ

本機器は、本体、パッド（ケーブル付き）からなり、パッド内のコイルから微弱な磁界を発生させ、これらを疼痛部等に照射することにより、疼痛を改善または緩和させる機器です。

- ※ 本機器の使用に際しては、必ず医療機関や医療従事者等の指示に従ってください。
- ※ 使用中に身体の異常を感じたら、直ちに使用を中止し、医療機関や医療従事者等に相談してください。体調不良や事故を起こすおそれがあります。
- ※ ご使用の前に、この「使用上の注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ※ ここに示した注意事項は、本機器を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

また注意事項は、次のように区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告サイン	内容
 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。

図記号の例	
	禁止（してはいけないこと）を示します。
	分解禁止
	強制（必ず守ること）を示します。 左図は“一般的な強制”を示します。

使用上の注意

機器の使用に関する注意事項

警 告

下記の医用電気機器と併用しないでください。事故や身体への障害をまねくおそれがあります。

- (1) 人工心肺、ペースメーカー等の生命維持用医用電気機器
- (2) 心電計などの装着型医用電気機器

医療従事者等の案内を受けた方のみ、ご使用下さい。トラブルや体調不良を起こすおそれがあります。

次のような人には、原則使用しないでください。事故や体調不良を起こすおそれがあります。

- 妊娠している人、その可能性のある人、または授乳中の人
- 適用部位の皮膚に異常のある人
- 電磁波アレルギーのある人
- その他医師の治療を受けている人や特に身体に異常を感じている人

分解、改造、修理は絶対にしないでください。発火したり、事故やトラブル、故障の原因になります。

注 意

本機器を使用中、または電源が入っている状態で電池交換やお手入れをしないでください。トラブルや故障の原因になります。

自動車等を運転しながら使用しないでください。安全走行を損なうおそれがあります。

本機器に衝撃を与えたり荷重をかけないでください。けがや故障、破損の原因になります。

使用上の注意

機器の使用に関する注意事項（つづき）

注 意

ケーブルや接続部分を結んだり、無理に曲げたり・伸ばしたりしないでください。故障や破損の原因になります。

睡眠時には使用しないでください。けがや事故、トラブルを起こすおそれがあります。

医師に運動を制限されている場合、運動中に使用しないでください。スポーツや登山など、ウォーキングを超える激しい運動中に使用しないでください。事故やトラブル、故障の原因になります。

酒気を帯びた状態で使用しないでください。事故や体調不良、トラブルを起こすおそれがあります。

他の機器への接続はしないでください。事故やトラブル、故障の原因になります。

本製品を2台以上同時に使用しないでください。事故やトラブル、故障の原因になります。

パッドと本体を接続する時には、接続する向きをご確認ください。無理に逆向きで接続したり、コネクタに強い力をかけると故障や破損の原因になります。

コネクタに金属などを差し込まないでください。事故やトラブル、故障の原因になります。

湿度の高いところや、入浴しながらの使用はしないでください。機器本体、パッド、ケーブルを濡らさないでください。事故やトラブル、故障の原因になります。

小児については使用経験がなく、安全性が確立されていないので、使用可否の判断については医療機関や医療従事者等の指示に従ってください。

使用上の注意

機器の使用に関する注意事項（つづき）

注 意

機器本体、パッド、ケーブルに薬品を塗布しないでください。ベンジン／シンナー／アルコールなどの各種溶剤およびそれらを含むもの（除光液／クレゾール／接着剤など）が付着すると変質するおそれがあります。薬品類には十分注意してください。

本機器を加熱したり冷却したりしないでください。事故やトラブル、故障の原因になります。

高齢者、身体の不自由な方には、保護者や付添いなしでは使用しないでください。事故やトラブルを起こすおそれがあります。

皮膚に異常を感じた場合は、使用を中止し、医療機関や医療従事者等に相談してください。皮膚がかぶれるなど、炎症をおこすおそれがあります。

 正常な皮膚のみにご使用いただき、傷や発疹など皮膚表面に異常がある場合には使用しないでください。皮膚がかぶれるなど、炎症をおこすおそれがあります。

パッドを患部にあてたまま放置しないでください。皮膚がかぶれるなど、炎症をおこすおそれがあります。

次のような場所で使用しないでください。事故や故障、トラブルを起こすおそれがあります。

- ・ 使用環境温湿度以外の場所（直射日光のあたる場所、車内など）
- ・ 強電磁界下（例：変電施設や携帯電話の基地局の近く、電気毛布、電気カーペット、磁器ベルトや磁界を発生させる他の医療機器の近くで使用する場合など）
- ・ ほこりの多い場所
- ・ 火気の近く
- ・ 過度な振動や落下の可能性のある不安定な場所
- ・ 化学薬品の保管場所や、腐食性ガスの発生する場所

使用上の注意

機器の使用に関する注意事項（つづき）

注 意

	1 回あたり 30 分以上、1 日 1 回以上使用してください。ただし、1 日の合計使用時間が 2 時間を超えないようにしてください。
	使用環境温湿度を正しくおまもりください。トラブルや体調不良を起こすおそれがあります。
	本機器に異常な発熱を感じたら、ただちに使用を中止してください。過熱、ショートなどによる事故、トラブル、故障につながるおそれがあります。

電池に関する注意事項

注 意

	電池は必ず単三電池を4本使用してください。 電池が4本より少ない場合、単三以外の電池を使用した場合には正しく作動しません。 電池はニッケル水素電池又はアルカリ電池の使用を推奨しております。 マンガン電池は持続時間が短くなりますので非推奨となります。
	電池の向きを確認して、正しく入れてください。 電池を逆方向に入れると故障したり、本機器が発熱する、あるいは作動しなくなるおそれがあります。
	電池ソケットのふたを閉める時に指をはさまないようご注意ください。 怪我の原因になります。
	長期間機器を使用しない場合は、電池を取り外してください。 電池からの液漏れを起こすおそれがあります。

使用上の注意

お手入れに関する注意事項

注 意

機器はいつも清潔にしてお使いください。

万が一機器が汚れた場合には、乾いた柔らかい布でふき取ってください。

汚れがひどい場合は、水、薄めた中性洗剤または0.05%次亜塩素酸ナトリウム水溶液をしみ込ませた布をかたく絞ってふき取り、乾いた柔らかい布で拭いてください。

お手入れは、必ず本体の電源が入っていない状態で行ってください。

お手入れの後、機器に水滴が残っていないことを確認してください。



保管に関する注意事項

注 意

次のような場所に保管しないでください。事故や故障の原因になる可能性があります。

- ・ 保管環境温湿度以外の場所(直射日光のあたる場所、車内など)
- ・ 強電磁界下
- ・ ほこりの多い場所
- ・ 火気の近く
- ・ 過度な振動や落下の可能性がある不安定な場所
- ・ 化学薬品の保管場所や、腐食性ガスの発生する場所

小さい子どもの手の届かないところに保管してください。怪我をするおそれがあります。

次回の使用に支障がないように清潔にしてから保管してください。故障の原因になる可能性があります。

保管環境温湿度を正しくおまもりください。故障の原因になる可能性があります。



使用上の注意

廃棄に関する注意事項（機器をレンタルされた方）

注 意



機器（本体、パッド、取扱説明書、添付文書、個装箱）は返却対象ですので廃棄しないでください。使用後は機器を借りた施設に返却してください。

具体的な返却方法につきましては、機器を借りた施設の指示に従ってください。

廃棄に関する注意事項（機器を購入された方・施設）

注 意



耐用期間を経過した機器につきましては購入者様の側で責任を以て廃棄をお願い致します。廃棄の際には廃棄物処理法等の関連法規にご注意の上適切なご対応をお願い致します。

使用上の注意

エイト専用粘着シート(別売)の使用に関する注意事項

注 意

	粘着シートにより皮膚に異常を感じた場合は、使用を中止し、医療機関や医療従事者等に相談してください。
	正常な皮膚にのみご使用いただき、傷や発疹など皮膚表面に異常がある箇所に使用しないでください。
	粘着シートは使い捨てです。毎回新しいシートに取り替えてください。
	粘着シート貼付部位の皮膚は清潔で乾いた状態にしてください。また、体毛の多い部位では、必要に応じて剃毛してください。粘着面が汚れたり傷んだりすると、粘着力が落ちますのでご注意ください。
	エイト専用粘着シート以外の両面テープは、効果が得られないので使用しないでください。

エイト専用粘着シート(別売)の保管に関する注意事項

注 意

	濡れたり、直射日光を避け、常温常湿で保存してください。
--	-----------------------------

エイト専用粘着シート(別売)の廃棄に関する注意事項

注 意

	粘着シートはお住まいの市区町村の指示に従って廃棄してください。
--	---------------------------------

内容の確認

下記セット内容がすべて揃っているかご確認ください。



・本体：1台

・パッド：4個

・取扱説明書（本紙）

・添付文書

・個装箱

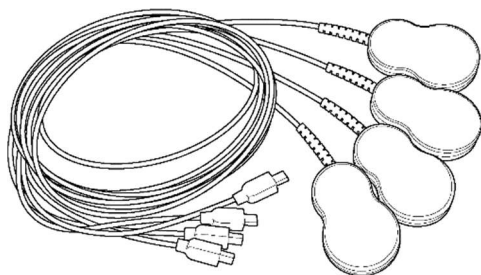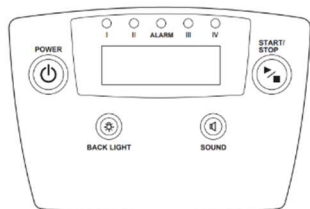

・単三電池4本は上記セットに含まれておりませんので、別途ご準備ください。

本機器の機能


電源の自動オフ	使用せずに無操作のまま3分経つと自動的に電源が切れます。
治療の自動終了	治療開始から30分経つと自動的に止まり待機状態になります。
接続異常のお知らせ	パッドが接続されていない、使用中にパッドが抜ける、使用中にパッドが追加される、ケーブルが断線している等の正常に使用できない状態になった場合、アラーム音が鳴り、アラームランプが点滅、液晶画面にメッセージが表示されます。(14ページ参照)
電池切れのお知らせ	液晶画面の電池残量表示が0になった場合、アラーム音が鳴り、アラームランプが点滅、液晶画面にメッセージが表示されます。(14ページ参照)
定期点検のお知らせ	定期点検の時期が近づく、もしくは、定期点検の時期になった場合、アラーム音が鳴り、アラームランプが点滅、液晶画面にメッセージが表示されます。(15ページ、19ページ参照)
操作音の設定	サウンドスイッチを押すことで、操作音のあり/なしを選んで設定することができます。液晶画面にサウンドマークが表示されると「操作音あり」、非表示で「操作音なし」に設定されます。接続異常、電池切れなどをお知らせするアラーム音を止めることはできません。
バックライトの点灯	各スイッチを操作したり液晶画面にメッセージが表示される際に自動的にバックライトが10秒点灯します。また、バックライトスイッチを押している間はバックライトを点灯させることができます。

ご使用前の準備


各部の名称とはたらき

本体


正面図

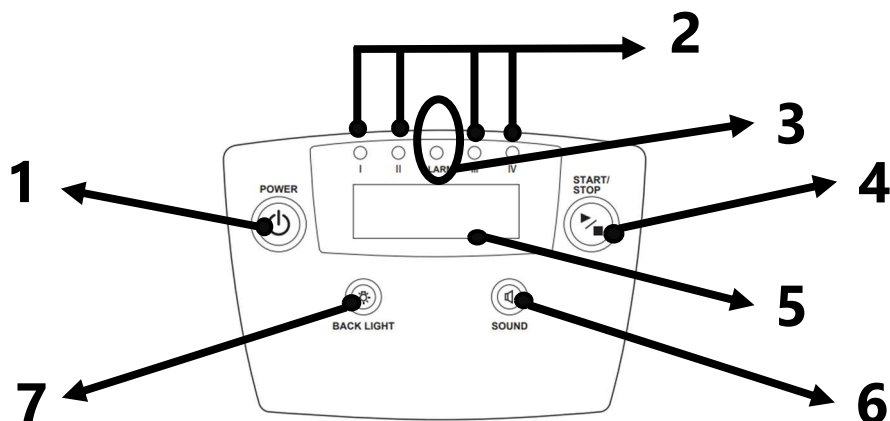

背面図

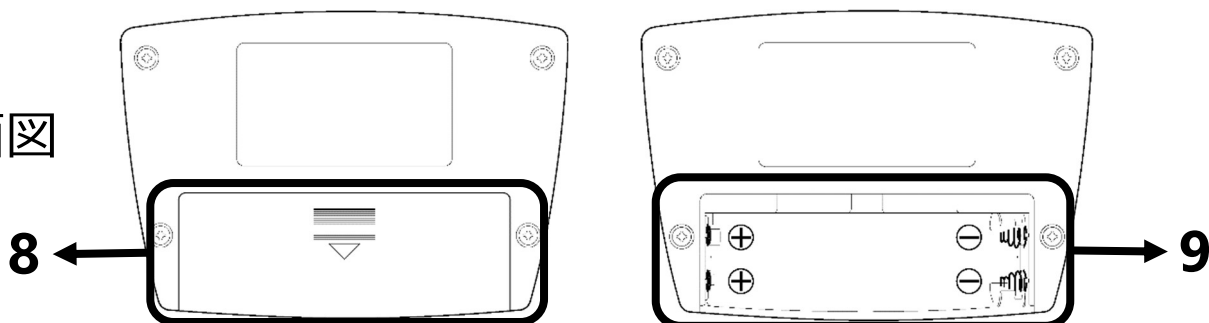

側面図

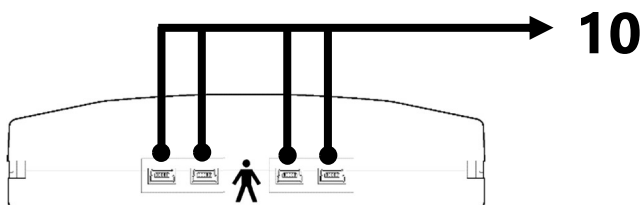


製品に表示されているシンボルの意味



B形装着部

パッド

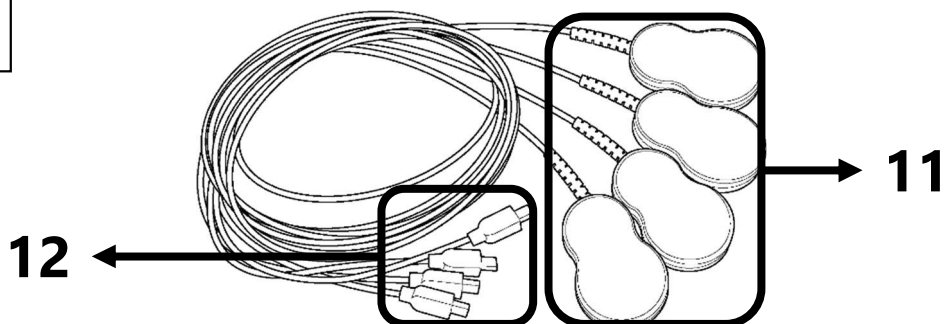


ご使用前の準備

各部の名称とはたらき（つづき）

番号	名称	表示	はたらき
1	電源スイッチ	POWER 	電源をオン/オフします。
2	接続ランプ	I II III IV	パッドが接続されると緑色のLEDが点灯します。
3	アラームランプ	ALARM	接続異常や電池切れの場合に赤いLEDが点滅します。
4	スタート/ストップスイッチ	START/STOP 	治療を開始（▶）/終了（■）します。
5	液晶画面	なし	操作音設定状況、電池残量、治療残り時間、各種メッセージが表示されます。
6	サウンドスイッチ	SOUND 	操作音のあり/なしを設定することができます。
7	バックライトスイッチ	BACK LIGHT 	液晶画面のバックライトが点灯されます。
8	電池ふた	なし	電池を収納し、電池が外れるのを防止します。
9	電池ソケット	なし	電池を収納します。
10	接続ポート	なし	パッド接続用コネクタの差し込み口で、パッドと本体を接続すると、対応する接続ランプが点灯します。
11	パッド	なし	患部に磁界を照射します。ケーブルで本体と接続します。
12	パッド接続用コネクタ	なし	接続ポートに取り付け、パッドと本体を接続します。

ご使用前の準備

液晶画面の表示

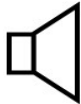表示	意味
	電池残量表示 電池の残量が示されます。  : 電池残量が充分にあります。  : 電池残量が少なくなっています。  : 電池残量がありません。 “電池を交換してください”というメッセージが表示されます。
	サウンドマーク マーク表示あり：操作音あり マーク表示なし：操作音なし
Time 30分00秒	治療残り時間表示 治療を開始するとカウントダウンが始まり、残り時間が減っていきます。
治療を終了します	治療残り時間が0になり治療が終了すると表示されます。
治療を中止します	治療の途中でスタート/ストップスイッチを押して強制終了をすると表示されます。
電源オフ	電源が切れることを示します。 ・電源の自動オフ時および電源スイッチを1秒以上長押ししたオフ時に表示されます。
パッド未接続	パッド未接続（0個）の状態では治療を開始すると表示されます。 ※治療時はパッドを接続してから開始してください。
パッド接続異常	治療中にパッドと本体の接続に異常があると表示され、治療が中止されます。 ・パッドが本体から外れる则表示されます。 ・コネクタやケーブルに異常があると表示されます。 ※パッドを挿しなおしても異常が解消されない場合は、本機器の提供を受けた施設へご連絡ください。

ご使用前の準備


液晶画面の表示（つづき）

表示	意味
パッド追加異常	治療中にパッドと本体の接続が追加されると表示され、治療が中止されます。 ※スタート/ストップスイッチを押して始めから治療を行ってください。
パッド(Ⅰ～Ⅳ)電源異常	パッド電源に異常があると表示されます。 ※本機器の提供を受けた施設へご連絡ください。
電池を交換してください	電池残量がなくなると表示されます。 すべての電池を新しい電池に交換してください。 ※電池交換の方法は18ページ参照
定期点検の時期が近づいています	定期点検の時期が近づくと表示されます。 ※本機器の提供を受けた施設へご連絡ください。
定期点検が必要です	定期点検の時期になると表示されます。 安全のため、治療を開始することは出来なくなります。 ※本機器の提供を受けた施設へご連絡ください。

ご使用前の準備


電池の入れ方

1. 本体の背面にある電池ソケットのふたを押しながら下にずらして開ける

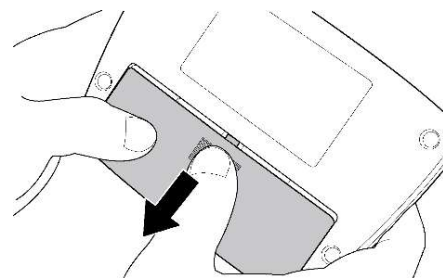

2. 電池ソケットの +/- を確認する

ほこりや異物が入っていないことも確認する。

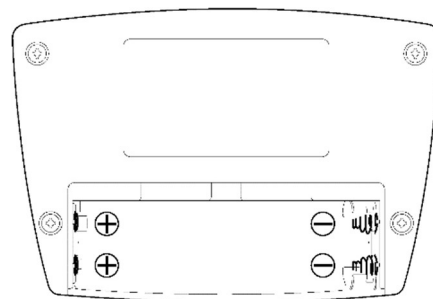


3. 単3電池の +/- を確認して電池を入れる


- 電池の向き（+/-）を必ず確認してください。

本体の背面から見て、左が「+」、右が「-」と入れるのが正しい向きです。

※正しく入れたときは、電池が全て同じ向きとなります。

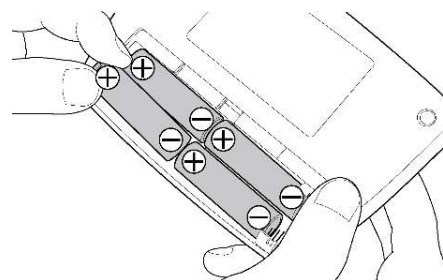

- 向きを間違えると、故障、発熱のおそれがあります。

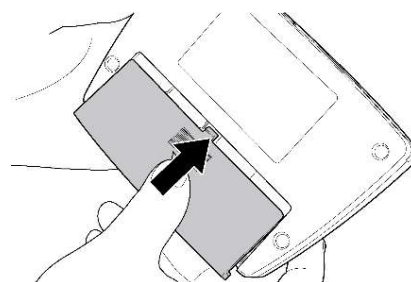

4. 電池ソケットのふたを閉じる

※使用する電池

- 電池はニッケル水素電池又はアルカリ電池の使用を推奨しております。マンガン電池は持続時間が短くなりますので非推奨となります。
- 同一メーカーの新しい乾電池4本を使用してください。
- 古い乾電池と新しい乾電池の使用やメーカーの異なる乾電池を組み合わせ使用しないでください。
- 取り扱いに関しては、電池に記載されている注意事項をよくお読みください。

本体の動作確認

- はじめてご使用いただくとき
- しばらくご使用になっていなかったとき

上記の場合このページの操作を行い、本体のスイッチやLEDランプ、音、お知らせ機能などが正常に動くかどうかを確認してください。


※正常に動かなかった場合は、本機器の提供を受けた施設へご連絡ください

° 操作	確認	補足事項
1. 電源スイッチを1秒以上長押しする。	- 電源が入る。 - "Time 30分00秒"が液晶画面に表示される。 - バックライトが光る。	この時の状態を待機状態と呼びます。
2. 電源を入れた後5秒経過し、バックライトが消えている状態で、バックライトスイッチを押す。	- バックライトが点灯する。	バックライトスイッチを押している間だけ点灯します。
3. サウンドスイッチを数回押す。	- サウンドマークの表示/非表示が切り替わる。	以降の動作確認のために、サウンドマークは表示させておいてください。
4. 接続ポートにパッドを接続する。	- 接続ランプが点灯する。	-
5. スタート/ストップスイッチを1秒以上長押しする。	- 操作音が鳴る。 - 接続ランプが点滅する。 - 液晶画面に残り治療時間が表示される。	治療時間のカウントダウンが始まります。
6. 治療中にスタート/ストップスイッチを1秒以上長押しする。	- 操作音になる。 - 接続ランプが点灯する。 - "治療を中止します"というメッセージが液晶画面に表示される。	待機状態に戻ります。
7. 電源スイッチを1秒以上長押しする。	- 操作音になる。 - "電源オフ"というメッセージが液晶画面に表示される。 - 電源が切れる。	-


使用者による保守・点検

電池交換

1. 本体の背面にある電池ソケットのふたを押しながらして開ける


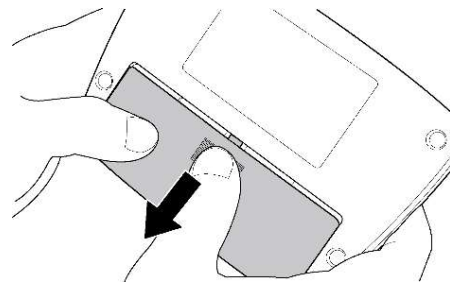


2. 古い電池を取り出す

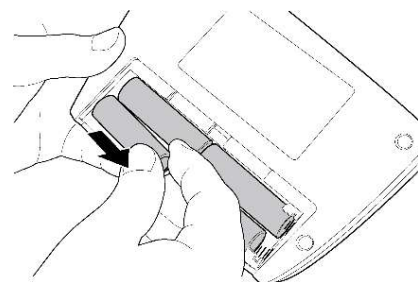

3. 新しい電池を入れる

- 電池の向き（+/-）を必ず確認してください。
本体の背面から見て、左が「+」、右が「-」と入れるのが正しい向きです。
※正しく入れたときは、電池が全て同じ向きとなります。
- 向きを間違えると故障・発熱のおそれがあります。

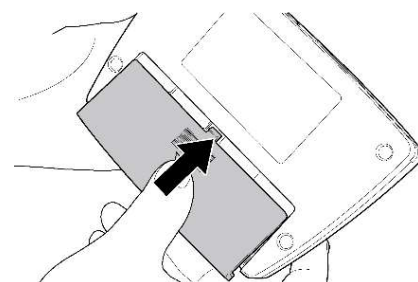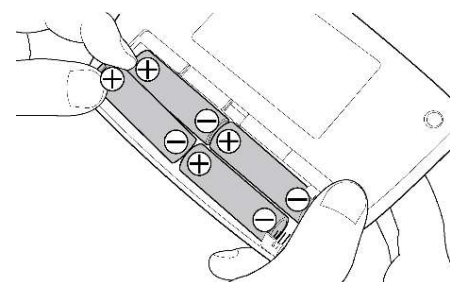

お手入れ

1. 本機器の汚れを乾いた柔らかい布でふき取る。

- 汚れがひどいときは、水、薄めた中性洗剤、または0.05%次亜塩素酸ナトリウム水溶液をしみ込ませた布をかたくしぼってふき取った後、柔らかい布でから拭きしてください。
※お手入れは必ず本体の電源が入っていない状態で行ってください。
※本機器に水などの液体がかからないようにしてください
※お手入れの後、機器に水滴が残っていないことを確認してください。

1. 本体の液晶に「定期点検の時期が近づいています」と表示された場合は、本機器の提供を受けた施設に連絡し、定期点検を依頼する。
2. 表示が出てから約50時間使用すると「定期点検が必要です」と表示される。速やかに本機器の提供を受けた施設に連絡し、定期点検を依頼する。

※この段階では安全のため治療が開始できなくなりますので、「定期点検が必要です」と表示される前に定期点検を依頼してください。

定期点検に関するQ&A

Q1：定期点検とは何ですか？

A1：本説明書に記載の保守点検とは別に、専用の機器を用いて詳細な検査を行うことです。

Q2：定期点検は義務ですか？

A2：義務です。機器を安全にお使いいただくために必要です。


Q3：いつ定期点検を行うのですか？

A3：使用頻度に応じて2年から5年の間に定期点検が必要となります。

本機器の使い方



- 使用時は、リラックスしてお使いください。
- パッドと皮膚の間に両面テープを使用する場合は、専用の粘着シート（別売）をご使用ください。

1. 本体の電源スイッチ（）を 1秒以上長押しして電源を入れる

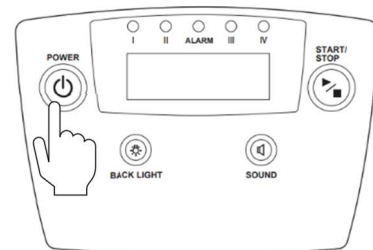

2. 接続ポートにパッドを接続する

- パッド接続用コネクタの向きを確認して接続してください。

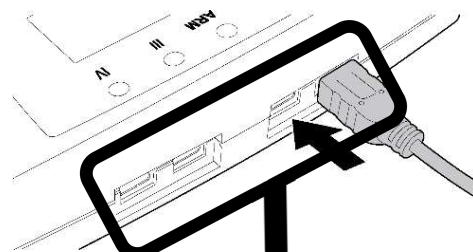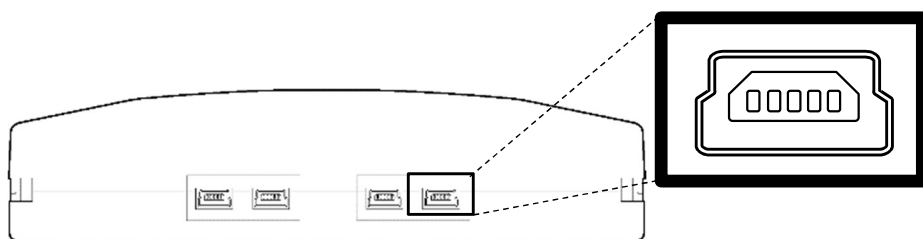


※4箇所同時に使用したい場合は、すべてのパッドを各ポートに接続してください。
パッドを1個だけ接続した状態でも使用可能です。

- パッドが接続されていないポートがある場合、動作中は未使用ポートに触れないでください。

⇒ 電源が切れる可能性があります。

※電源が切れた場合は、1の操作からやり直してください。

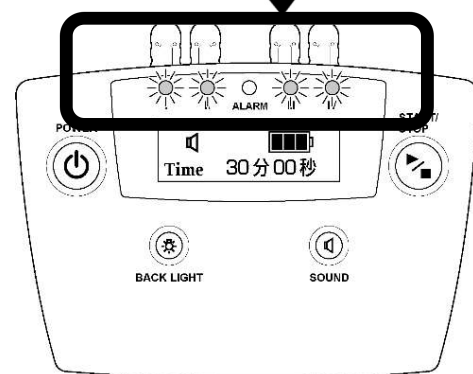

- パッドが接続されると緑色のLEDが点灯します。
治療開始前にパッドの接続状態を確認してください。

ご使用方法


本機器の使い方（つづき）

パッドの抜き差しは水平方向にゆっくり、やさしく行ってください。

- 過度な力を加えた場合や、左右方向や斜め上下方向に力を加えた場合は、接続ポートが破損する可能性があります。

※パッドの「おもて」と「うら」について

- パッドの曲面側が「おもて」、平面側が「うら」となります。治療する際は、必ず患部の皮膚に「うら」をあてて下さい。

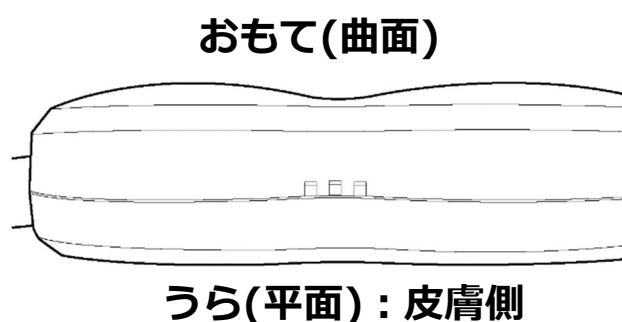


3. パッドを治療したい部位にあてる

●パッドのあて方

以下のいずれかの方法でパッドを患部にあて、固定してください。

- ① 粘着シート（別売）を使って、パッドを患部に貼り、固定してください。
（別売の粘着シートの使い方は24ページ参照）
- ② パッドの「うら」面を患部に直接あて、市販の固定用バンドあるいはサージカルテープ等でパッド全体を覆うように固定してください。

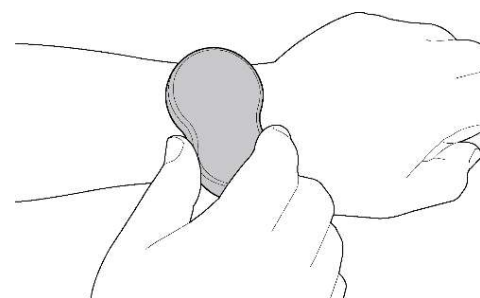

※体表面の凹凸により、パッドの「うら」全体を患部に装着することができない場合には、パッドの中心を患部の中心にあててください。


※エイト専用粘着シート以外の両面テープは、効果が得られないので使用しないでください。

ご使用方法

本機器の使い方（つづき）


4. スタート/ストップスイッチ（) を1秒以上長押しして30分間治療 をおこなう

（液晶画面に残り治療時間が表示され、
接続ランプ（緑色）が点滅し始めます）

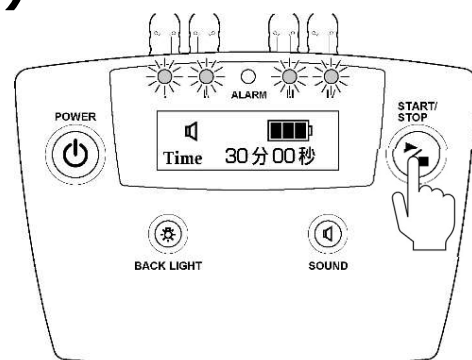


5. 治療の終了

30分経つと自動で停止します（液晶画面に
“治療を終了します”と表示され、自動的に待
機状態に戻ります）。

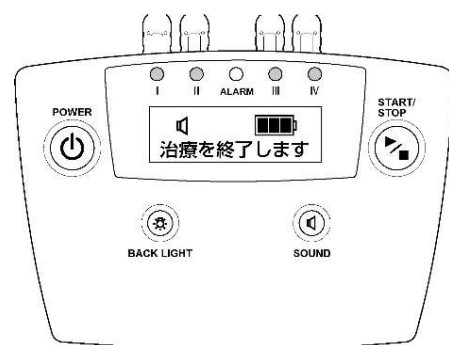


6. 電源スイッチ（) を1秒以上 長押しして電源を切る

液晶画面に“電源オフ”と表示され、電源が
切れます。

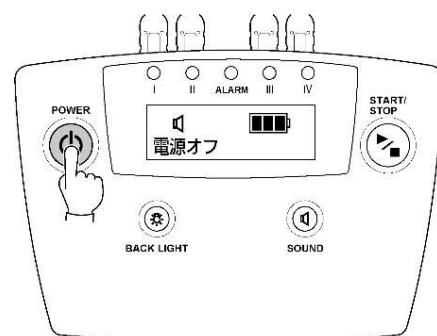

7. 患部からパッドを取り外す

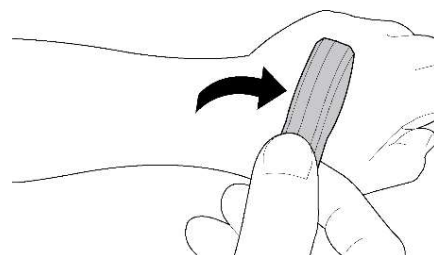

ご使用方法

本機器の使い方（つづき）

8. 使用後は必ず本体からパッドを抜いて保管する


- 小さい子どもの手の届かないところに保管してください。
- 次回の使用に支障がないように清潔にしてから保管してください。
- 保管環境温湿度を正しくおまもりください。
- パッドを挿したまま保管すると、思いがけない力が加わり接続ポートが破損する恐れがあります。

※使用上の注意にある、お手入れに関する注意事項と保管に関する注意事項をご確認ください。

途中で使用を中止したいとき


1. 治療中にスタート/ストップスイッチ（）を1秒以上長押しする

液晶画面に“治療を中止します”と表示され、治療を終了し待機状態に戻ります。

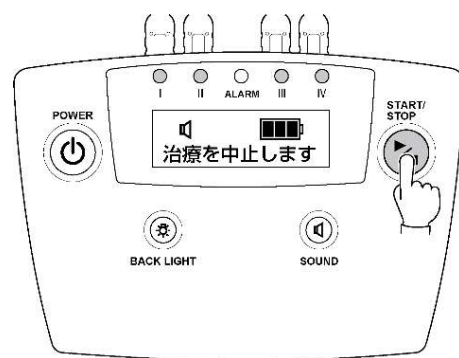

2. 電源スイッチ（）を1秒以上長押しして電源を切る

液晶画面に“電源オフ”と表示され、電源が切れます。

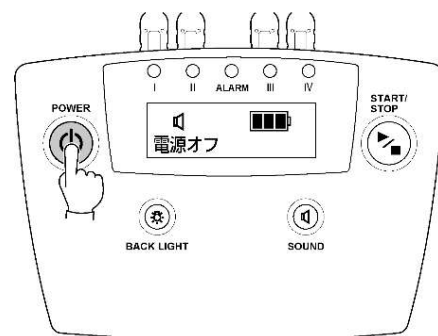


ご使用方法


パッドへの専用粘着シート(別売)の使い方

- 粘着シート（別売）には肌側と機器側（パッドの「うら」面側）があります。必ず以下の手順を守って貼ってください。


1. 粘着シート（別売）をミシン目にそって切り離す

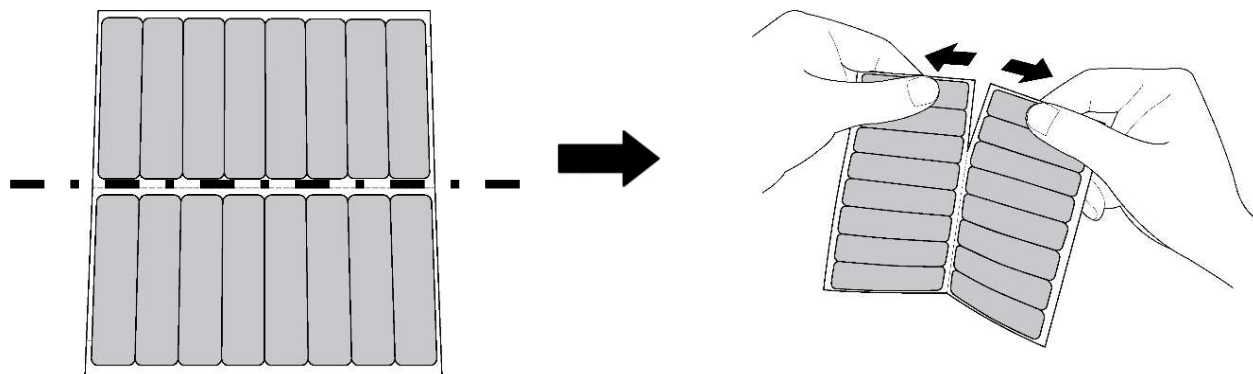

2. 粘着シート(別売)の台紙をはがす

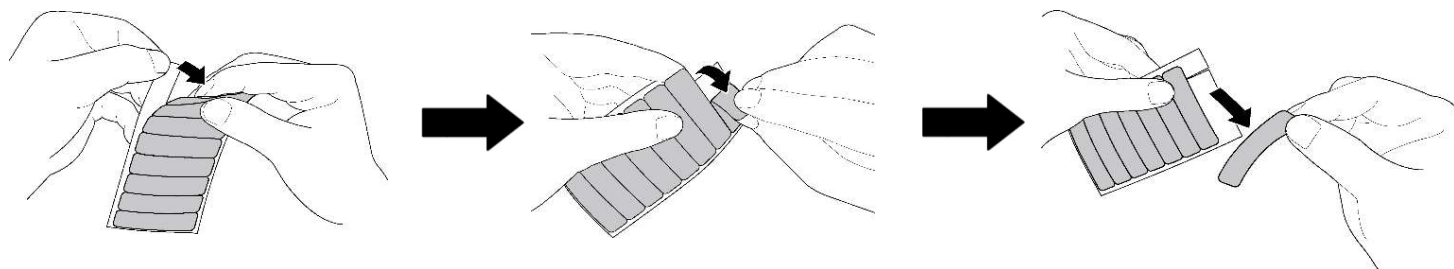


3. 粘着シートをパッドの「うら」面の中央部に貼り付ける

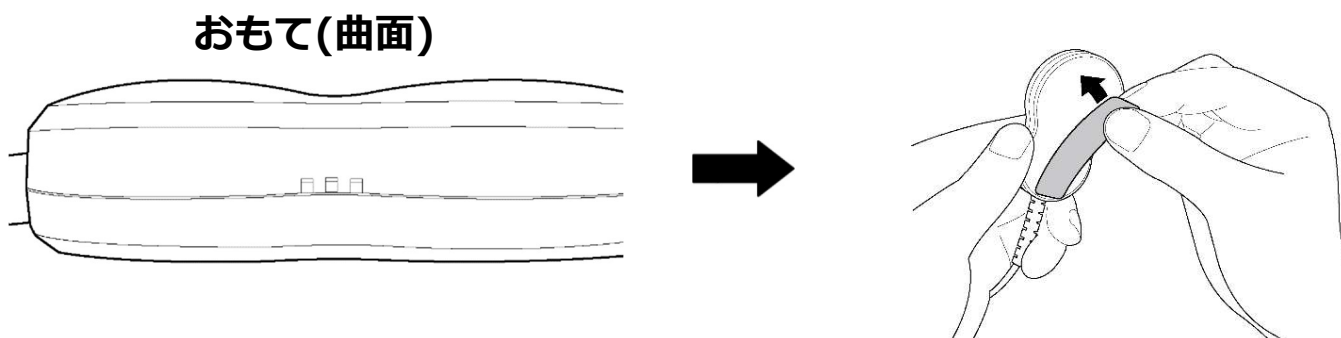

ご使用方法

パッドへの専用粘着シート(別売)の使い方 (つづき)

4. パッドの「うら」面を治療したい部位に貼る

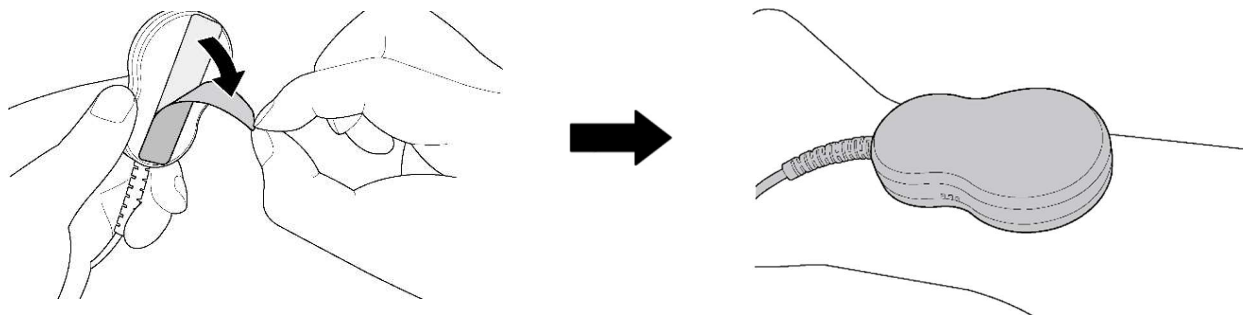

パッドの「うら」面に残っている肌側のライナー(保護フィルム)をはがし、そのままパッドの「うら」面を患部に貼り、固定してください。

●貼り付け後の本機器の使用方法は20ページ参照

※体表面の凹凸により、パッドの「うら」全体を患部に装着することができない場合には、パッドの中心を患部の中心にあててください。

※エイト専用粘着シート以外の両面テープは、効果が得られないので使用しないでください。

ご使用中に異常が生じた場合は、まず次の点をお調べください。

こんなとき	原因	対処
■電源が入らない ■液晶画面に何も表示されない	電池を入れ忘れている	→ 電池を入れてください (16ページ参照)
	電池の方向を間違えている	→ 電池を正しい方向にきちんと入れてください (16ページ参照)
	電池が消耗している	→ 電池を交換してください (18ページ参照)
	スイッチを正しく押していない	→ スwitchを約1秒押してください (20ページ参照)
■電源がすぐ切れる	電池が消耗している	→ 電池を交換してください (18ページ参照)
	累計4時間（1日2時間使用して2日）以内に切れる場合、故障の可能性あり	→ 本機器の提供を受けた施設へご連絡ください (28ページ参照)
■治療が開始されない	パッドが接続されていない	→ パッドを本体に接続してください (20ページ参照)
	定期点検の時期になっている	→ 本機器の提供を受けた施設へご連絡ください (15、19ページ参照)
■操作音が出ない	操作音なしに設定されている	→ サウンドスイッチを押してください (11ページ参照)

上記の対処を行っても解決しない場合は使用を中止し、本機器の提供を受けた施設へご連絡ください。

- 本機器が故障した場合は使用をお止めください。
使用を続けると事故やトラブルにつながるおそれがあります。

販売名	エイト
商品名	ait
型名	AT-04
医療機器承認番号	30400BZX00015000
類別	機械器具(12) 理学診療用器具
一般的名称	交番磁界治療器
医療機器分類	管理医療機器 特定保守管理医療機器
電源電圧	単3形乾電池4本 (2.4～3.0V)
使用環境温湿度	0～35℃, 30～85% RH (但し結露なきこと)
保管環境温湿度	-20～60℃, 30～96% RH (但し結露なきこと)
形状・構造	1. 本体 寸法（縦×横×厚さ）：100×148×35 mm 重量：310 g（電池含む） 2. パッド 寸法（縦×横×厚さ）：64×42×15 mm 重量：36 g（ケーブル含む） ケーブル長：900mm
材質	本体・パッドケース：ABS ケーブル：PVC、TPE
電撃保護	内部電源機器
装着部の分類	B形装着部（本機器の装着部はパッドの「うら」面）
付属品	AT-04取扱説明書、添付文書、個装箱
製造販売元	株式会社 P・マインド

※お断りなく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

EMC
適合

本機器は EMC 規格 IEC 60601-1-2 : 2007 (Ed.3.0) に適合しています。

しかし、他の医用電気機器、電子機器との併用において相互に影響を生じる場合がありますので、距離が近い場合、機器が正しく動作するかを確認してください。

Q1 : パッドはどこに当てれば良いですか？

A1 : まずは痛みがある場所に当ててください。必要に応じて医療機関や医療従事者等にご相談ください。

Q2 : 機器は毎日使った方が良いのですか？

A2 : エイトは毎日使用いただくことで効果が出る機器ですので、出来るだけ毎日ご使用ください。

Q3 : 使用していると、ケーブルが黄色く変色してきました。これは異常でしょうか？


**A3 : ケーブルの被覆は紫外線や皮脂汚れにより変色することがあります。変色により、機器の性能が低下することはありませんのでご安心ください。
ケーブルにひびや裂け目が生じた場合は、本機器の提供を受けた施設に連絡してください。**

Q4 : 電池がすぐに切れる気がします。これは異常でしょうか？

**A4 : 新しい電池に交換後、パッドを4つ接続した状態で使用し、累計4時間（1日2時間使用して2日）以内に電池が切れる場合、故障の可能性があります。
本機器の提供を受けた施設へご連絡ください。
使用推奨期限を超過した電池を使用すると、未使用でも、電池がすぐに切れる場合があります。**

エイト専用 粘着シート

別売品は、別売品取り扱い施設にてお買い求めください。

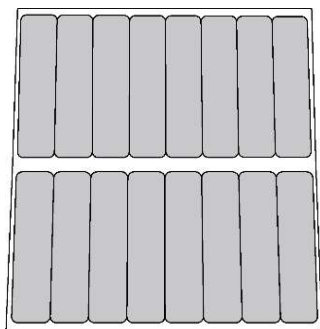

- パッドを固定するために、市販のバンド・テープなどを使用された場合の不具合や事故、病気、ケガなどについては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 地震・雷・風水害などの天災および製造販売元・貸出施設の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、使用対象者の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関しては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本書に記載した内容は、すべての起こり得る事象を網羅したものではございません。

本機器をご使用の際は、エイト本体及び専用粘着シートの添付文書もご参照ください。

添付文書は株式会社P・マインド又はPMDAのWebサイトからもご確認いただくことが可能です。